

Anální dilatátory

A.1001-3

Anální kryotermální dilatátor ve 3 velikostech je účinný u patologických stavů, jako jsou: zácpa, jizevnaté stenózy, u hypertonií, hemoroidů, fissur a u proktalgii.

Doporučujeme dokoupit přípravky: A.3050 – Dilatan krém, který obsahuje heřmánek, třezalku a měsíček lékařský. A.3060 – CAMOCAL krém, přírodní prostředek na léčbu onemocnění v řitní oblasti. A.3100 – Sapigen K, osobní luxus pro intimní hygienu.



DILATAN PLUS

sada 2 ks – ø 18, 20 mm
Katalogové číslo: **A.1001**

DILATAN PLUS

sada 2 ks – ø 23, 27 mm
Katalogové číslo: **A.1002**

DILATAN sada

3 ks, ø 20, 23, 27 mm
Katalogové číslo: **A.1003**

POUŽITÍ DILATANŮ PRO...

1

ANÁLNÍ TRHLINY

dilataci

2

chladovou terapii

HEMOROIDY

kryoterapii

DILATAN SOLO

1 ks, ø 20 mm
Katalogové číslo: **A.1020**

DILATAN SOLO

1 ks, ø 23 mm
Katalogové číslo: **A.1023**

DILATAN SOLO

1 ks, ø 27 mm
Katalogové číslo: **A.1027**

DILATAN SOLO

1 ks, ø 30 mm
Katalogové číslo: **A.1030**

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zahřejte dilatátor pod teplou tekoucí vodou (ne přes 50 °C) v případě hypertonu nebo bolestivého spazmu. Vychladte dilatátor v lednici (ne pod 0 °C) v případě análního krvácení.
2. Potřete dilatátor krémem nebo lubrikační masťou.
3. Zasouvejte dilatátor velmi pomalu do análního otvoru až po jeho bazi, vsedě na bidetu nebo vleže na posteli, je jedno zda před nebo po defekaci.
4. Ponechejte dilatátor takto 1–3 minuty v souladu s lékařským doporučením.
5. Vytáhněte jej pomalu ven. UPOZORNĚNÍ: v souladu s lékařským doporučením opakujte dilataci jednou až dvakrát denně, minimálně po dobu jednoho měsíce. Následující fáze, rovněž pod dohledem specialisty, spočívá v zavedení dilatátoru s větším průměrem po stejnou dobu a stejně často.
6. Umyjte dilatátor teplou vodou a neutrálním mýdlem a v případě nutnosti na několik hodin ponořte dilatátor do dezinfekčního roztoku.
7. Usušte dilatátor a pečlivě uložte zpět do krabičky.

UPOZORNĚNÍ: v případě, že výrobek není v perfektním stavu, nebo je obal poničený, prosíme o zaslání výrobci, číslo šarže a den výroby, natištěné na obalu.



**PRODUKT JE URČEN POUZE
PRO JEDNOHO PACIENTA!**

A.1001, A.1002, A.1003,
A.1020, A.1023, A.1027,
A.1030



+420 602 506 806

